

Instrucciones de uso

Mentonera Premium

Uso previsto

La mentonera Premium está indicada para su uso en pacientes de >30 kg para ayudar a evitar las fugas en la boca que pueden provocar sequedad nasal y oral durante la terapia CPAP y binivel. La mentonera se puede usar con cualquier arnés de Philips Respironics.

⚠ Advertencias

- En caso de interrupción del suministro eléctrico, la mentonera no le permitirá abrir la boca. Esto puede provocar que se vuelva a inhalar el aire espirado en el circuito.
- Lávela a mano antes de utilizarla por primera vez. Examínela para comprobar si presenta daños o desgaste. Deseche o reemplace cualquier componente cuando sea necesario.
- En algunos pacientes puede producirse enrojecimiento de la piel, irritación o molestias. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con un profesional médico.

☰ Notas

- Los incidentes graves que se produzcan en relación con este dispositivo deben notificarse a Philips y a la autoridad competente del estado miembro en el que resida el usuario o el paciente.
- Se puede encontrar una copia electrónica de estas instrucciones en: www.philips.com/IFU.

Instrucciones de limpieza

Limpie la mentonera una vez a la semana.

1. Mezcle detergente lavavajillas líquido con agua tibia (1,3 ml de detergente por cada 1 litro de agua).


⚠ Precaución

- No utilice lejía, alcohol o soluciones de limpieza que contengan alcohol o lejía ni productos de limpieza con acondicionadores o suavizantes.
 - El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto.
2. Sumerja la mentonera en la mezcla de detergente y déjela en remojo durante 5 minutos.
 3. Agite la mentonera durante otros 5 minutos.
 4. Saque la mentonera y enjuáguela a fondo con 3,8 litros de agua tibia.
 5. Deje secar la mentonera al aire y alejada de la luz solar directa. Asegúrese de que la mentonera esté seca antes de utilizarla.
 6. Examínela para comprobar si presenta daños o desgaste. Deséchela y sustitúyala si es necesario.


Uso de la mentonera

1. Coloque la mascarilla y cualquier tapa, cinta o arnés.
2. Cierre la boca y coloque la mentonera sobre la barbilla.

☰ Nota: Coloque la parte superior de la mentonera hacia la parte delantera de la cabeza, para aplicar el ángulo de presión apropiado sobre el mentón.

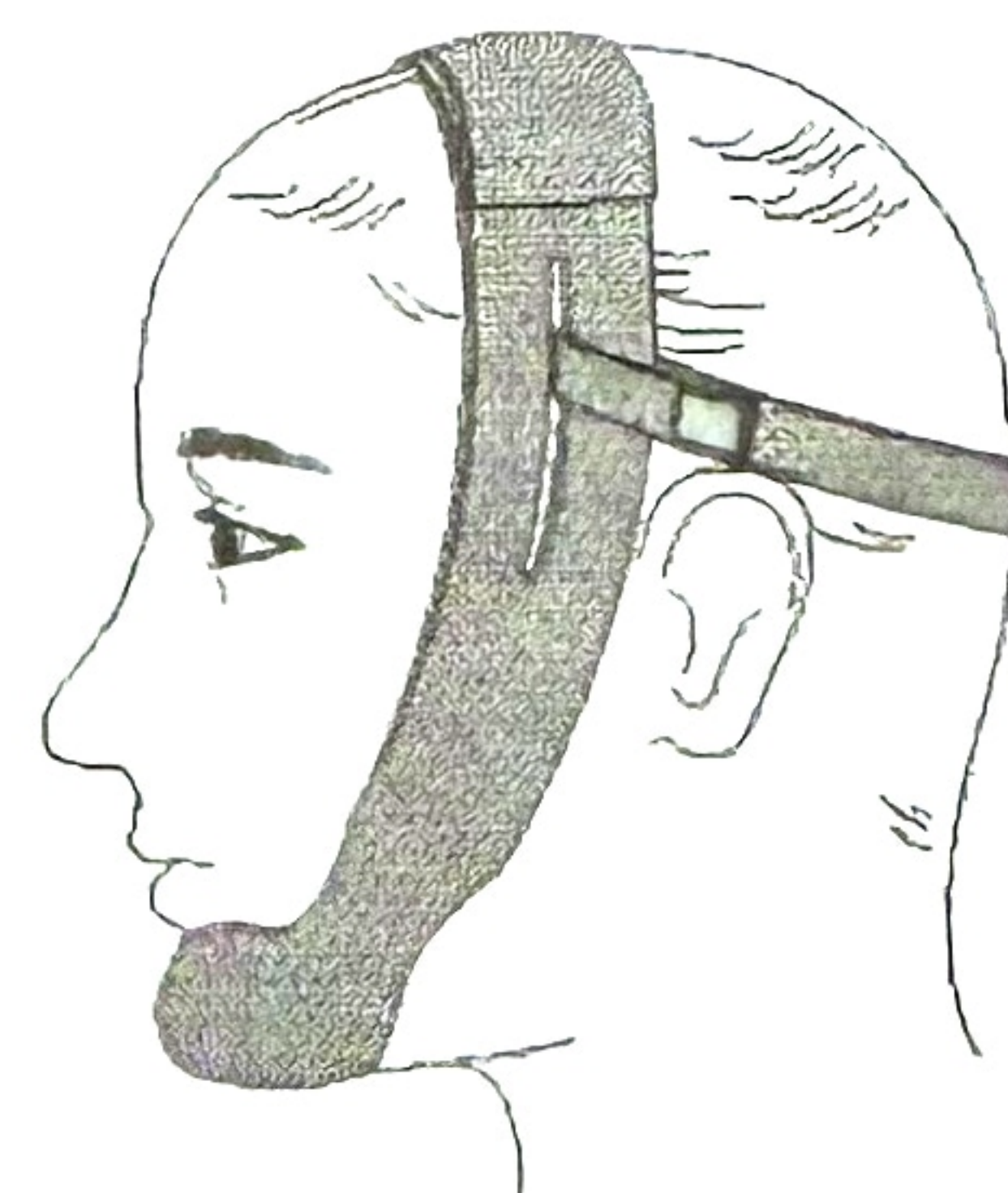

▲ Figura 1

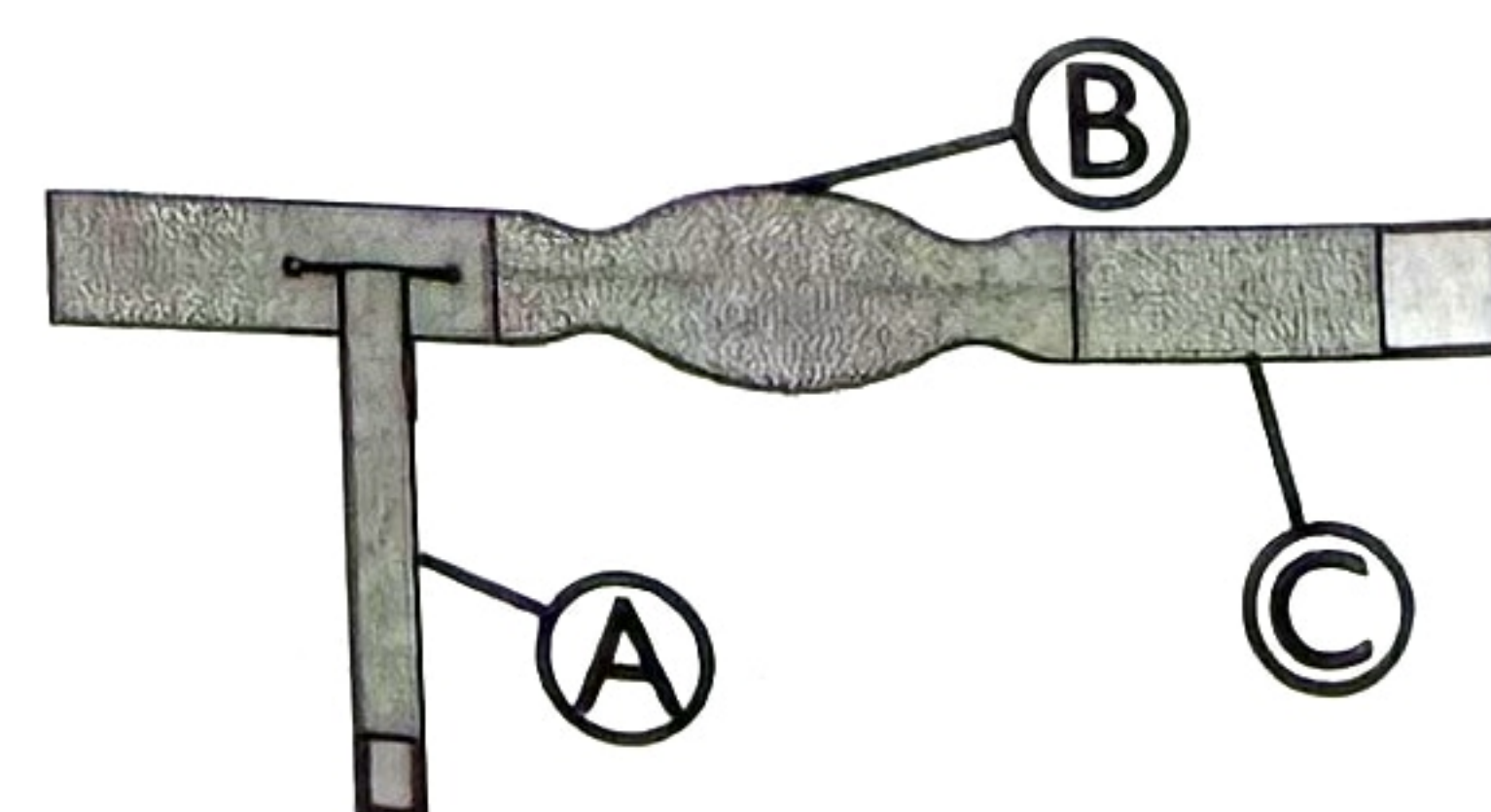

▲ Figura 2

A = Banda de apoyo ajustable
B = Protector para la barbilla
C = Mentonera

3. Tire ligeramente de ambos lados de la mentonera y una los dos extremos.
- ⊞ Nota: No tense demasiado la mentonera.
4. Coloque la banda de apoyo ajustable por la parte de atrás de la cabeza y únala con la mentonera. Ajústela como corresponda.

Eliminación

La mentonera deberá desecharse cada año.

Deseche este dispositivo de acuerdo con las normativas locales de recogida y reciclaje de residuos. Para obtener más información, visite www.philips.com/recycling.

Asistencia técnica del producto

En caso de tener problemas con esta mentonera o de necesitar ayuda para su montaje, uso o mantenimiento, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos. Si necesita ponerse en contacto directamente con Philips Respironics, llame al servicio de atención al cliente de Philips Respironics al +1-724-387-4000, o vaya a www.respironics.com para buscar los datos de contacto del servicio de Atención al cliente más cercano.

Condiciones de almacenamiento

Entre -20 °C y +60 °C

Entre un 15 % y un 95 % de humedad relativa, sin condensación

Glosario de símbolos

	Advertencia o precaución: señala una advertencia o precaución.		Identificador único del dispositivo: indica la información del identificador único del dispositivo.
	Unidad de embalaje: indica el número de piezas incluidas en el embalaje.		Importador: indica la entidad que importa el producto sanitario a la Unión Europea.
	Producto sanitario: indica que el artículo es un producto sanitario.		Paciente único, múltiples usos: indica que un producto sanitario se puede utilizar varias veces en un único paciente.
	Instrucciones de uso electrónicas: indica que la información pertinente sobre el uso del producto está disponible en formato electrónico.		Fecha de fabricación: indica la fecha de fabricación del producto. País del fabricante: indica el país de fabricación del producto. Nota: En la etiqueta, "CC" se sustituye por el código del país.